

PROCEDIMENTO

Procedimento HECCUS TURBO

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

Clinica de Estetica Avancada IzabellasPOP - Uso de EPIs, Paramentacao e DesparamentacaoCodigo: POP-BIO-004Versao: 2.0Emissao: 09/05/2026RT: Izabela Karoline de Lima SaadeBiomedica - CRBM 3250Revisao: anual ou quando houver alteracaoPagina: controle automatico no Word

Identificacao do estabelecimento

Razao SocialIzabellas Estetica Avancada LtdaNome FantasiaClinica de Estetica Avancada IzabellasCNPJ56.322.004/0001-40EnderecoRua Coronel Marcos Rovaris, 1503 - Centro - Icara/SCTelefone(48) 99127-3623E-mailizabellasesteticaavc@gmail.comResponsavel TecnicaIzabela Karoline de Lima SaadeConselhoBiomedica - CRBM 3250Funcionarios03 colaboradoresHorarioSegunda a sexta das 10h as 19h; sabado das 8h as 12hColetora RSSCOLIX Solucoes para Residuos

Controle documental

VersaoDataDescricao da revisaoElaborado porAprovado por1.010/03/2026Versao inicial da clinica.Izabela Karoline de Lima SaadeIzabela Karoline de Lima Saade2.009/05/2026Revisao tecnica para atendimento das exigencias sanitarias e padronizacao dos registros.Izabela Karoline de Lima SaadeIzabela Karoline de Lima Saade

1- Objetivo

Heccus turbo é a combinação de ultrassom de alta potência, correntes elétricas Aussie (correntes de média frequência) e correntes elétricas polarizadas. O procedimento acelera o metabolismo do corpo e quebra as células de gordura, promovendo sua eliminação e melhorando a textura da pele. É indicado no tratamento de celulites, gordura localizada, melhora da firmeza da pele, para tratamentos pós-cirúrgicos, pois promove o aumento da atividade metabólica. 2- Área de Aplicação Corporal 3- Responsabilidades Esteticistas, massoterapeutas, cosmetologas, biomédicas e fisioterapeutas. 4- Materiais / Equipamentos Necessários Descrição Quant. Mínima. (unid.) Lençol 1 Toalha 1 Aparelho Heccus Turbo 1 Gel Neutro (bismaga) 1 Álcool 70% (borrifador) 1 Espátula 1 5- Descritivo da Execução

1. Verificar se todos os materiais necessários estão na sala;
2. Ligar o aparelho;
3. Chamar o cliente pelo nome, cumprimentar com simpatia usando "bom dia" ,"bom tarde" ou "boa noite";
4. Apresentar-se ao cliente;
5. Encaminhar o cliente para a sala, retirar as medidas e posicioná-lo na maca de acordo com a região a ser tratada.
6. Cobrir a região íntima com uma toalha;

7. Selecione a opção de acordo com a área a ser tratada (Gordura localizada + Tonificação muscular / Celulite + Tonificação muscular), na parte superior da tela “inserção de dados”, ajuste a área em 5, o que já remete automaticamente aos 20 minutos de procedimento, ajustar a adipocidade na opção “adipômetro”, onde o profissional deve avaliar a camada de gordura da região a ser tratada.
 8. Realizar a higienização das mãos com água e sabonete líquido antisséptico conforme POP (Higiene das Mãos);
 9. Aplicar gel neutro na região a ser tratada;
 10. Espalhar o gel com a manolha do equipamento;
 11. No equipamento pressionar a tela “START” (em verde) para dar início à terapia;
 12. Na tela de execução, é onde se faz o ajuste da intensidade da corrente, através das setas em amarelo. A intensidade da corrente varia de acordo com a tolerância de cada cliente; deve-se ajustar a dosagem de acordo com a sua sensibilidade e no decorrer do procedimento aumenta-la de maneira gradativa.
 13. Após os 20 minutos de procedimento, o equipamento emitirá um aviso sonoro, e a corrente é interrompida automaticamente;
 14. Apertar na tecla de stop para finalizar a aplicação, e só após o aviso sonoro parar desacoplar a manopla do paciente.
 15. Remover o gel da região com uma toalha e liberar o paciente;
 16. Agradecer a presença e certificar-se da satisfação do atendimento e liberá-lo;
 17. Higienizar o aparelho e a maca com álcool 70%. NUNDA BORRIFAR ALCOOL DIRETAMENTE NA PONTEIRA, SEMPRE NA TOALHA OU PAPEL. 6- Limpeza e desinfecção das superfícies • A organização da sala é de responsabilidade do funcionário, assim como a limpeza e desinfecção das bancadas e macas que devem ser feitas com álcool 70%; • Os lençóis e toalhas devem ser tirados em frente à cliente e armazenados no local indicado. 7- Indicações • Gordura Localizada • Celulite • Tonificação muscular • Drenagem linfática • Melhora da firmeza da pele • Pós Operatórios • Eletroporação • Ionização de ativos 8- Contraindicações • Gestantes • Marcapasso • Cardiopatias graves • Implantes metálicos grandes • Inflamações • Neoplasias • Pele irritada ou com condições adversas
- 9- Anexos Figura1: Aparelho Heccus Turbo (Ibramed).

Referencias tecnicas e sanitarias

RDC Anvisa n. 222/2018 - Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Saude.

RDC Anvisa n. 63/2011 - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de Saude.

RDC Anvisa n. 36/2013 - Acoes para a seguranca do paciente em servicos de saude.

RDC Anvisa n. 42/2010 - Disponibilizacao de preparacao alcoolica para friccao antisseptica das maos.

Nota Tecnica Anvisa n. 01/2018 - Higienizacao das maos em servicos de saude.

RDC Anvisa n. 67/2007 - Boas praticas de manipulacao de preparacoes magistrais e officinais para uso humano em farmacias, aplicavel a rastreabilidade de manipulados recebidos de farmacia regular.

Manual de Seguranca do Paciente em Servicos de Saude - Anvisa, quando aplicavel.

Icara/SC, ____ de _____ de 2026.

Izabela Karoline de Lima Saade

Biomedica - CRBM 3250

Responsavel Tecnica

